



PRIMO ASSEMBLAGGIO E ISTRUZIONI PER L'UTILIZZATORE

Per i seguenti modelli:

ello_v02_55G, ello_v02_55R, ello_v02_55B,
ello_v02_62G, ello_v02_62R, ello_v02_62B

1. Panoramica

1.1 Montaggio iniziale - passo dopo passo

1. Montare le ruote anteriori.
Dettagli nel capitolo 2
2. Regolare l'altezza delle impugnature.
Dettagli nelle istruzioni per l'uso
3. Controllare la regolazione dei freni.
Per il metodo di regolazione, vedere le istruzioni per l'uso
4. Montare la cinghia posteriore.
5. Montare la borsa.

1.2 Lista di controllo per il primo montaggio

- | | |
|--|---|
| ☐ Le ruote anteriori e le coperture di design sono montate | ☐ La regolazione dei freni è stata controllata |
| ☐ Le impugnature sono regolate alla stessa (e corretta) altezza | ☐ La cinghia posteriore è montata |
| ☐ La regolazione dell'altezza è fissata | ☐ Borsa montata |

1.3 Elenco di controllo per la verifica delle funzioni

- ☐ Il dispositivo può essere acceso e spento.
- ☐ Tutte le luci funzionano. Coprire il sensore delle luci (nella parte inferiore del sedile destro, vedi foto). ello dispone di 5 luci (2 sul lato anteriore, 2 sul lato posteriore, 1 sotto il sedile).
- ☐ Il segnalatore acustico funziona.
- ☐ Il pulsante ostacoli funziona; in caso contrario, controllare la regolazione del freno.
- ☐ Il dispositivo offre un notevole sostegno quando si cammina in salita.
- ☐ Il dispositivo frena sensibilmente quando si cammina in discesa. A tale scopo, impostare il livello di fitness su un livello basso.



2. Montaggio delle ruote anteriori

1. Rimuovere il perno di sicurezza dal telaio.

Si consiglia di premere con un utensile sottile (chiave a brugola, cacciavite).



2. Innestare il gruppo ruote anteriori. Destra e sinistra sono identiche. Assicurarsi che l'incavo (A) sia rivolto verso il basso.



3. Reinserire il perno di sicurezza.



4. Controllare che la ruota sia fissata correttamente provando a tirarla.



5. Montare e fissare le coperture di design.

Attenzione: Le coperture di design del lato destro e del lato sinistro sono diverse.



3. Istruzione per l'utilizzatore

ello è stato progettato per essere utilizzato nel modo più semplice e intuitivo possibile. Tuttavia, sono necessarie istruzioni dettagliate, poiché ello si differenzia da un deambulatore standard.

3.1 Principio di base

Accendere ello e iniziare a camminare: il sistema di sensori si occupa della regolazione dell'appoggio e, affinché questo funzioni in modo ottimale, è necessario che l'utilizzatore abbia impostato il livello di fitness adeguato. Ciò influisce principalmente sul comportamento di frenata in discesa e sul comportamento quando si utilizza il pulsante ostacoli.

Nota: Si raccomanda di usare sempre il termine “livello di fitness”, senza ricorrere ad alternative come "livello di supporto" o "livello di velocità". Questi ultimi termini generano confusione tra gli utilizzatori.

Le seguenti funzioni e operazioni devono essere eseguite almeno una volta insieme all'utilizzatore (come descritto nelle istruzioni per l'uso):

- Camminare in salita e in discesa.
- Superare un gradino muovendosi verso l'alto e verso il basso.
- Piegare e aprire il deambulatore.
- Ricaricare la batteria.

3.2 Istruzioni di sicurezza particolarmente importanti

- Prima di sedersi, azionare sempre il freno di stazionamento!
- Se i freni sono regolati in modo da essere troppo stretti o troppo allentati, è necessario regolarli nuovamente!
- Non effettuare il trasporto di persone sul deambulatore!

3.3 Note sull'utilizzo

- Il pulsante ostacoli si utilizza solo per superare ostacoli e su terreni irregolari – **non per l'utilizzo continuo.**
- Le difficoltà iniziali nel superamento di ostacoli sono normali. È necessario insegnare la tecnica corretta (vedere le istruzioni per l'uso).
- Se il dispositivo non frena a sufficienza in discesa, è possibile regolare il livello di fitness. Se ciò non è sufficiente, è necessario utilizzare il freno manuale.
- Quando è spento, il deambulatore può essere utilizzato come un deambulatore standard.

PRIMO ASSEMBLAGGIO E ISTRUZIONI PER L'UTILIZZATORE

Produttore

VOSS healthcare GmbH

Jülicher Straße 306

52070 Aquisgrana

Germania

info@voss-healthcare.net

+49 241 510 056 22

Numero di parte: 7013348400

Versione: v01.0DE

Visitate il nostro sito
Internet all'indirizzo:
voss-healthcare.net

