



Pirmas surinkimas ir instrukcija vartotojui

Skirta šiems modeliams:

ello\_v02\_55G, ello\_v02\_55R, ello\_v02\_55B,  
ello\_v02\_62G, ello\_v02\_62R, ello\_v02\_62B

# 1. Apžvalga

## 1.1 Pradinis surinkimas - žingsnis po žingsnio

1. Sumontuokite priekinius ratus.  
Išsami informacija pateikta 2 skyriuje
2. Sureguliuokite rankenų aukštį.  
Išsami informacija pateikta naudojimo instrukcijoje
3. Patikrinkite stabdžių nustatymą.  
Nustatymo būdas naudojimo instrukcijoje
4. Pritvirtinkite nugaros diržą.
5. Sumontuokite krepšį.

## 1.2 Pirmo surinkimo kontrolinis sąrašas

- |                                                                            |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sumontuoti priekiniai ratukai ir apdailos detalės | <input type="checkbox"/> Patikrintas stabdžių reguliavimas |
| <input type="checkbox"/> Rankenos nustatytos į vienodą aukštį              | <input type="checkbox"/> Sumontuotas nugaros diržas        |
| <input type="checkbox"/> Sureguliuotas fiksuotas aukštis                   | <input type="checkbox"/> Sumontuotas krepšys               |

## 1.3 Funkcijų kontrolinis sąrašas

- ☐ Įrenginį galima įjungti ir išjungti.
- ☐ Visi žibintai veikia.  
*Taip pat šviesos jutiklis (dešinės sėdynės apačioje, žr. pav.) „ello“ turi 5 žibintus (2x priekyje, 2x gale, 1x po sėdyne).*
- ☐ Garsinis signalas veikia.
- ☐ Kliūties mygtukas veikia;  
*jei neveikia, patikrinkite stabdžių nustatymus.*
- ☐ Įrenginys suteikia žymiai padeda einant įkalne.
- ☐ Įrenginys pastebimai stabdo, kai einama nuokalne.  
*Norėdami tai padaryti, nustatykite žemą fizinio pasirengimo lygį.*



Šviesos jutiklis

## 2. Priekinių ratukų sumontavimas


1. Išimkite apsauginį kaištį iš rėmo.

*Geriausia išstumti plonu įrankiu (veržliarakčiu, atsuktuvu).*



2. Įdėkite priekinio rato mazgą.

*Dešinė ir kairė yra vienodos. Įsitikinkite, kad įduba (A) nukreipta žemyn.*

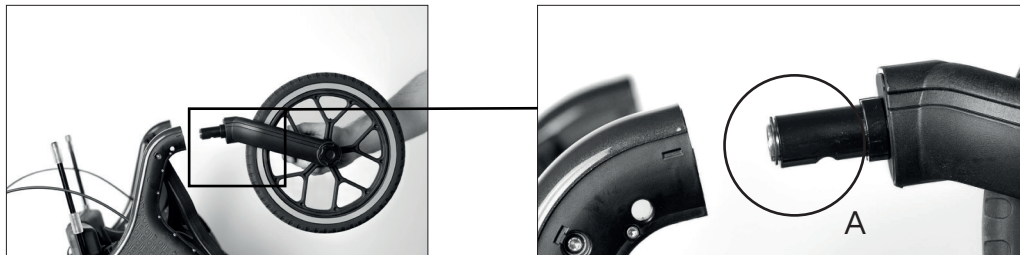

3. Vėl įdėkite apsauginį kaištį.



4. Patraukdami už ratuko patikrinkite, ar jis tinkamai pritvirtintas.



5. Pritvirtinkite ir užfiksuokite apdailinius skydus.

**Dėmesio:** Apdailiniai skydai dešinėje ir kairėje skiriasi.



### 3. Naudotojo supažindinimas

„ello“ sukurta taip, kad ją būtų galima valdyti kuo paprasčiau ir intuityviau. Vis dėlto būtina išsamiai instruktuoti, nes „ello“ skiriasi nuo standartinės vaikštynės.

#### 3.1 Pagrindinis principas

Ijunkite „ello“ ir leiskite pradėti judėti - jautiklių sistema perima atramos sureguliaciją, o kad vaikštynė veiktų optimaliai, naudotojui turi būti nustatytas tinkamas fizinio pasirengimo lygis. Tai visų pirma turi įtakos stabdymui važiuojant nuokalne ir veikimui naudojant kliūties mygtuką.

***Pastaba:*** Visada vartokite terminą „fizinio pasirengimo lygis“ - jokių alternatyvių terminų, pavyzdžiui, „palaikymo lygis“ arba „greičio lygis“. Tai sukelia painiavą tarp naudotojų.

Naudotojas turi bent kartą praktiškai išbandyti šias funkcijas ir operacijas (kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje):

- Eikite į kalnę ir nuokalnę.
- Įveikite pakopą aukštyn ir žemyn.
- Sulenkite arba išskleiskite vaikštynę.
- Įkraukite akumuliatorių.

#### 3.2 Ypač svarbūs saugos nurodymai

- Prieš sėsdami visada įjunkite stovėjimo stabdį!
- Jei stabdžiai nustatyti per stipriai arba per silpnai, juos reikia sureguliuoti iš naujo!
- Vaikštyne negalime vežti jokių kitų asmenų!

#### 3.3 Pastabos, susiję su naudojimu

- Kliūčių mygtukas naudojamas tik kliūtims įveikti ir nelygumams įveikti, bet ne nuolatiniam darbui – **ne nepertraukiamam darbui.**
- Pradiniai sunkumai įveikiant kliūtis yra įprasti. Reikia apmokyti taisyklingos technikos (žr. naudojimo instrukciją).
- Jei įrenginys nepakankamai stabdo važiuojant nuokalne, galima reguliuoti fizinio pasirengimo lygį. Jei to nepakanka, reikia naudoti rankinį stabdį.
- Išjungtą vaikštynę galima naudoti kaip įprastą vaikštynę.

Gamintojas

## Pirmas surinkimas ir instrukcija vartotojui

**VOSS healthcare GmbH**

Jülicher Straße 306

52070 Achenas

Vokietija

[info@voss-healthcare.net](mailto:info@voss-healthcare.net)

+49 241 510 056 22

Dalies numeris: 7013348400

Versija: v01.0DE

Aplankykite mus  
internete adresu  
[voss-healthcare.net](http://voss-healthcare.net)

