



Pierwsza instalacja & Instrukcja obsługi

Dla następujących modeli:

ello_v02_55G, ello_v02_55R, ello_v02_55B,
ello_v02_62G, ello_v02_62R, ello_v02_62B

1. Przegląd

1.1 Pierwszy montaż – krok po kroku

1. Zamontuj przednie koła.
Szczegóły w rozdziale 2
2. Wyreguluj wysokość uchwytów.
Szczegóły w instrukcji obsługi
3. Sprawdź ustawienie hamulca.
Metoda regulacji zamieszczona w instrukcji obsługi
4. Załóż pasek podtrzymujący plecy.
5. Zamontuj torbę.

1.2 Lista kontrolna dot. pierwszego montażu

- | | |
|--|--|
| ☐ Koła przednie oraz listwy ozdobne – Zamontowane | ☐ Regulacja hamulców – Sprawdzona |
| ☐ Uchwyty na tej samej oraz prawidłowej wysokości – Ustawione | ☐ Pasek podtrzymujący plecy – Zamontowany |
| ☐ Regulacja wysokości – Ustalona | ☐ Torba – Zamontowana |

1.3 Lista kontroli działania

- ☐ Urządzenie można włączać i wyłączać.
- ☐ Wszystkie światła są sprawne.
W celu przeprowadzenia kontroli zakryć czujnik światła (w dolnej części prawego siedzenia, patrz zdjęcie). Urządzenie ello posiada łącznie 5 świateł (2x przednie, 2x tylne, 1x pod siedzeniem).
- ☐ Klakson jest sprawny.
- ☐ Przycisk pokonywania przeszkody jest sprawny.
Jeśli tak nie jest, sprawdź ustawienie hamulca.
- ☐ Urządzenie zapewnia odczuwalne wsparcie podczas chodzenia pod górę.
- ☐ Urządzenie wyraźnie hamuje podczas chodzenia w dół.
W tym celu należy ustawić poziom sprawności na niski.



2. Montaż kół przednich

1. Usuń zawleczkę zabezpieczającą z ramy.

Najlepiej wycisnąć ją za pomocą cienkiego narzędzia (klucz imbusowy, śrubokręt).



2. Włóż zespół przedniego koła.

Prawa/lewa strona są identyczne. Upewnij się, że wgłębienie (A) jest skierowane w dół.



3. Ponownie zamocuj zawleczkę zabezpieczającą.



4. Sprawdź, czy koło jest prawidłowo zamocowane, pociągając za nie.



5. Załóż i przypnij listwy ozdobne.

Uwaga: Panele ozdobne po stronie prawej i lewej różnią się od siebie.



3. Instruktaż dla użytkownika

Urządzenie ello zostało zaprojektowane z myślą o zaoferowaniu możliwie najprostszego i intuicyjnego sterowania. Niemniej jednak konieczny jest szczegółowy instruktaż, gdyż urządzenie ello różni się od standardowego chodzika.

3.1 Podstawowa zasada

Włącz urządzenie ello i ruszaj w drogę! System czujników przejmuje regulację podparcia. W celu zapewnienia optymalnego działania, należy ustawić odpowiedni poziom sprawności użytkownika. Wpływa to przede wszystkim na zachowanie podczas hamowania na zjeździe i zachowanie podczas korzystania z przycisku pokonywania przeszkody.

Uwaga: *Zawsze używaj terminu „poziom sprawności” - bez stosowania alternatywnych wyrażen, takich jak „poziom wsparcia” lub „poziom szybkości”. Wprowadza to bowiem zamieszanie wśród użytkowników.*

Poniższe funkcje i operacje muszą zostać przećwiczone z użytkownikiem co najmniej jeden raz (zgodnie z opisem zamieszczonym w instrukcji obsługi):

- Spacer pod górę oraz w dół.
- Stopień w górę oraz w dół.
- Składanie lub rozkładanie chodzika.
- Ładowanie akumulatora.

3.2 Szczególnie ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze zaciągaj hamulec postojowy, zanim usiądziesz!
- Jeśli hamulce są ustawione zbyt ciasno lub zbyt luźno, należy je ponownie wyregulować!
- Zakaz przewożenia pasażerów na chodziku!

3.3 Uwagi dotyczące użytkowania

- Przycisk pokonywania przeszkody służy wyłącznie do pokonywania przeszkód i nierówności terenu. **Nie jest przeznaczony do pracy ciągłej.**
- Początkowe trudności podczas pokonywania przeszkód są zjawiskiem normalnym. Należy przyswoić sobie prawidłową technikę (patrz instrukcja obsługi).
- Jeśli urządzenie nie hamuje w wystarczającym stopniu podczas poruszania się w dół, można zmienić ustawienie poziomu sprawności. Jeśli to nie wystarczy, należy użyć hamulca ręcznego.
- Po wyłączeniu chodzika można używać jak zwykłego urządzenia tego typu.

Pierwsza instalacja & Instrukcja obsługi

Producent

VOSS healthcare GmbH

Jülicher Straße 306

52070 Akwizgran

Niemcy

info@voss-healthcare.net

+49 241 510 056 22

Numer części: 7013348400

Version: v01.0DE

Odwiedź nas w Internecie
pod adresem:
voss-healthcare.net

