



Primeira fase de montagem e instruções de utilização

Para os seguintes modelos:

ello_v02_55G, ello_v02_55R, ello_v02_55B,
ello_v02_62G, ello_v02_62R, ello_v02_62B

1. Vista geral

1.1 Montagem inicial - passo a passo

1. Montar as rodas dianteiras.
Detalhes no capítulo 2
2. Ajustar a altura das pegas.
Detalhes no manual de instruções
3. Verificar a regulação do travão.
Ver como definir no manual de instruções
4. Colocar o cinto de segurança.
5. Montar a bolsa.

1.2 Lista de verificação para a primeira instalação

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> As rodas dianteiras e as grelhas funcionais estão montadas | <input type="checkbox"/> A regulação do travão foi testada |
| <input type="checkbox"/> As pegas estão montadas à mesma altura e à altura correta | <input type="checkbox"/> O cinto de segurança está montado |
| <input type="checkbox"/> A regulação em altura está travada | <input type="checkbox"/> A bolsa está montada |

1.3 Lista de verificação sobre o controlo de funções

- O aparelho liga e desliga.
- Todas as luzes funcionam,
*mas cobrem o sensor de luz (na parte de baixo do assento do lado direito, ver imagem).
ello tem 5 luzes (2x à frente, 2x atrás, 1x debaixo do assento).*
- A buzina funciona.
- O botão de aviso de obstáculos está a funcionar;
se não estiver, verifique a regulação do travão.
- O aparelho proporciona um apoio perceptível nas subidas.
- O aparelho trava de modo perceptível nas descidas.
*Para esse efeito, o nível de aptidão deve ser ajustado
num nível inferior.*



2. Montar as rodas dianteiras

1. Retirar a cavilha de segurança do quadro.

É preferível pressionar para fora com uma ferramenta fina (chave Allen, chave de fendas).



2. Introduza o conjunto da roda dianteira.

A roda da direita e a da esquerda são idênticas. Certifique-se de que o entalhe (A) está virado para baixo.



3. Reintroduza a cavilha de segurança.



4. Puxe a roda para verificar se está corretamente fixada.



5. Coloque e fixe as grelhas funcionais.

Atenção: As grelhas funcionais à direita e à esquerda são diferentes.



3. Familiarização do utilizador

O ello foi concebido para ser controlado da forma o mais simples e intuitiva possível. No entanto, é necessária uma análise profunda da operação da máquina porque o ello é diferente dos andarilhos convencionais.

3.1 Princípios básicos de operação

Ligue o ello e comece a andar - o sistema de sensores assume o ajuste do apoio e, para que este funcione da melhor forma, é necessário definir o nível de aptidão adequado para o utilizador. Este nível influencia principalmente o comportamento de travagem em planos inclinados e o comportamento quando se utiliza o botão de aviso de obstáculos.

Indicação: *Utilize sempre o nível de aptidão - nada de alternativas como "nível de apoio" ou "nível de velocidade". Estas geram confusão entre os utilizadores.*

As seguintes funções e operações devem ser praticadas pelo menos uma vez com o utilizador (tal como descrito nas instruções de utilização):

- Subir e descer em plano inclinado.
- Subir e descer degraus.
- Dobrar ou desdobrar o andarilho.
- Carregar a bateria.

3.2 Indicações de segurança especialmente importantes

- Acione sempre o travão de estacionamento antes de se sentar!
- Reajuste os travões, se estes estiverem demasiado apertados ou demasiado soltos!
- Não é permitido transportar pessoas no andarilho!

3.3 Instruções sobre a utilização

- O botão de aviso de obstáculos só é utilizado para ultrapassar obstáculos e terrenos irregulares - **não para funcionamento contínuo.**
- As dificuldades iniciais na transposição de obstáculos são normais. A técnica correta deve ser transmitida ao utilizador (ver manual de instruções).
- Se o aparelho não travar suficientemente no plano inclinado, o nível de aptidão pode ser ajustado. Se isto não for suficiente, deve ser utilizado o travão manual.
- Quando desligado, o andarilho pode ser utilizado como um andarilho normal.

Primeira instalação e instruções de utilização

Fabricante

VOSS healthcare GmbH

Jülicher Straße 306

52070 Aachen

Alemanha

info@voss-healthcare.net

+49 241 510 056 22

Número da peça: 7013348400

Versão: v01.0DE

Visite-nos na Internet em:
voss-healthcare.net

