



Prvá montáž a návod na používanie

Pre nasledujúce modely:

ello_v02_55G, ello_v02_55R, ello_v02_55B,
ello_v02_62G, ello_v02_62R, ello_v02_62B

1. Prehľad

1.1 Prvá montáž – krok za krokom

1. Namontujte predné kolesá.
Podrobnosti v kapitole 2
2. Nastavte výšku rukovätí.
Podrobnosti v návode na obsluhu
3. Skontrolujte nastavenie brzdy.
Spôsob nastavenia v návode na obsluhu
4. Nasad'ite chrbtový popruh.
5. Namontujte tašku.

1.2 Kontrolný zoznam na počiatočnú montáž

- | | |
|--|--|
| ☐ Predné kolesá a dizajnové lišty namontované | ☐ Nastavenie brzd skontrolované |
| ☐ Rukoväti nastavené na rovnakú a správnu výšku | ☐ Chrbtový popruh namontovaný |
| ☐ Nastavenie výšky pevne zafixované | ☐ Taška namontovaná |

1.3 Kontrolný zoznam na kontrolu funkcií

- ☐ Zariadenie možno zapnúť a vypnúť.
- ☐ Všetky svetlá fungujú.
Na ich kontrolu zakryte svetelný snímač (v spodnej časti pravého sedadla, pozri obrázok). ello má 5 svetiel (2x predné, 2x zadné, 1x pod sedadlom).
- ☐ Klaksón funguje.
- ☐ Tlačidlo prekážky funguje.
Ak nie, skontrolujte nastavenie brzdy.
- ☐ Zariadenie poskytuje výraznú asistenciu pri chôdzi hore svahom.
- ☐ Zariadenie pri chôdzi zo svahu výrazne brzdí.
Nastavte úroveň kondície na nízku úroveň.



2. Montáž predných kolies

1. Odstráňte bezpečnostný kolík z rámu.

Najlepšie je vytlačiť ho tenkým nástrojom (imbusový kľúč, skrutkovač).



2. Vložte zostavu predného kolesa.

Pravá/ľavá strana sú identické. Uistite sa, že výrez (A) smeruje nadol.



3. Znovu zaveďte bezpečnostný kolík.



5. Nasadíte a pripevníte dizajnové lišty.

Pozor: Dizajnové lišty vpravo/vľavo sa líšia.

4. Ťahom za koleso skontrolujte správne upevnenie.



3. Inštruovanie používateľa

ello je navrhnutá tak, aby sa ovládala čo najjednoduchšie a najintuitívnejšie. Napriek tomu je potrebná podrobná inštrukcia, pretože ello sa líši od štandardnej chodúľky.

3.1 Základný princíp

Zapnite ello a vyrazte – prispôsobenie asistenta prevezme systém snímačov. Aby fungovala optimálne, musí byť pre používateľa nastavená vhodná úroveň kondície. To ovplyvňuje predovšetkým správanie pri brzdení zo svahu a správanie pri použití tlačidla prekážky.

Poznámka: *Vždy používajte termín úroveň kondície – žiadne alternatívy ako „úroveň asistencie“ alebo „rýchlostný stupeň“. To vedie k zmätku medzi používateľmi.*

Nasledujúce funkcie a operácie si musí používateľ aspoň raz precvičiť (ako je popísané v návode na použitie):

- Chôdza hore a dole svahom.
- Stúpanie a zostupovanie po schodoch.
- Zloženie/rozloženie chodúľky.
- Nabíjanie batérie.

3.2 Zvlášť dôležité bezpečnostné upozornenia

- Pred posadením sa vždy zatiahnite parkovaciu brzdou!
- Ak sú brzdy nastavené príliš pevne alebo príliš voľne, je potrebné ich znovu nastaviť!
- Žiadna preprava osôb na chodúľke!

3.3 Poznámky k používaniu

- Tlačidlo prekážky sa používa len na prekonávanie prekážok a nerovností terénu – **nie je určené na nepretržitú prevádzku.**
- Počiatočné ťažkosti pri prekonávaní prekážok sú normálne. Je potrebné naučiť sa správnu techniku (pozri návod na obsluhu).
- Ak zariadenie dostatočne nebrzdí pri jazde zo svahu, je možné upraviť úroveň kondície. Ak to nestačí, použite ručnú brzdou.
- Po vypnutí možno chodúľku používať ako štandardnú chodúľku.

Prvá montáž a návod na používanie

Výrobca

VOSS healthcare GmbH

Jülicher Straße 306

52070 Aachen

Nemecko

info@voss-healthcare.net

+49 241 510 056 22

Číslo dielu: 7013348400

Verzia: v01.0DE

Navštívte nás na
internetu na adrese:
voss-healthcare.net

