



Primera instalación e instrucciones de uso

Para los siguientes modelos:

ello_v02_55G, ello_v02_55R, ello_v02_55B,
ello_v02_62G, ello_v02_62R, ello_v02_62B

1. Visión general

1.1 Montaje inicial: paso a paso

1. Monte las ruedas delanteras.
Detalles en el capítulo 2
2. Ajuste la altura de las empuñaduras.
Detalles en las instrucciones de uso
3. Compruebe el ajuste de los frenos.
Método de ajuste en las instrucciones de uso
4. Coloca el cinturón trasero.
5. Monta la bolsa.

1.2 Lista de comprobación para la instalación inicial

- | | |
|--|--|
| ☐ Ruedas delanteras y embellecedores de diseño montados | ☐ Comprobación del ajuste de los frenos |
| ☐ Empuñaduras ajustadas a la misma y altura correcta | ☐ Correa trasera ajustada |
| ☐ Ajuste de altura fijo | ☐ Bolsa montada |

1.3 Lista de control de funciones

- ☐ El aparato puede encenderse y apagarse.
- ☐ Todas las luces funcionan,
pero tapa el sensor de luz (en la parte inferior del asiento derecho, ver foto). ello tiene 5 luces (2x delante, 2x detrás, 1x debajo del asiento).
- ☐ La bocina funciona.
- ☐ El botón de obstáculos funciona;
en caso contrario, compruebe el ajuste del freno.
- ☐ El dispositivo proporciona un apoyo notable al caminar cuesta arriba.
- ☐ El aparato frena notablemente al caminar cuesta abajo.
Para ello, ajuste el nivel de forma física a un nivel bajo.



2. Montaje de las ruedas delanteras

1. Retire el pasador de seguridad del armazón.

Lo mejor es presionar hacia fuera con una herramienta fina (llave Allen, destornillador).



2. Inserte el conjunto de la rueda delantera.

La derecha y la izquierda son idénticas. Asegúrese de que el hueco (A) esté orientado hacia abajo.



3. Reintroduzca el pasador.



5. Coloque y enganche los embellecedores.

Atención: Los embellecedores derecho/izquierdo son diferentes.

4. Compruebe que la rueda está correctamente fijada tirando de ella.



3. Familiarización del usuario

ello está diseñado para controlarse de la forma más sencilla e intuitiva posible. No obstante, se requiere una formación detallada, ya que ello difiere de un andador estándar.

3.1 Principio básico

Encienda ello y empiece a andar: el sistema de sensores se encarga de ajustar el apoyo y, para que funcione de forma óptima, debe establecerse el nivel de forma física adecuado para el usuario. Esto influye principalmente en el comportamiento de frenado cuesta abajo y en el comportamiento al utilizar el botón de obstáculos.

Nota: *Utilice siempre el término nivel de forma física, no alternativas como "nivel de apoyo" o "nivel de velocidad". Esto genera confusión entre los usuarios.*

Las siguientes funciones y operaciones deben practicarse con el usuario al menos una vez (como se describe en las instrucciones de uso):

- Caminar cuesta arriba y cuesta abajo.
- Subir y bajar escalones.
- Plegar y desplegar el andador.
- Cargar la batería.

3.2 Indicaciones de seguridad especialmente importantes

- Accione siempre el freno de estacionamiento antes de sentarse
- Si los frenos están demasiado apretados o demasiado flojos, hay que reajustarlos
- ¡No transporte pasajeros en el andador!
-

3.3 Notas sobre el uso

- El botón de obstáculos solo se utiliza para superar obstáculos y terrenos irregulares, **no para funcionamiento continuo**.
- Las dificultades iniciales al cruzar obstáculos son normales. Debe enseñarse la técnica correcta (véanse las instrucciones de uso).
- Si el aparato no frena suficientemente cuesta abajo, se puede ajustar el nivel de forma física. Si esto no es suficiente, debe utilizarse el freno manual.
- Cuando está desconectado, el andador puede utilizarse como un andador estándar.

Fabricante

VOSS healthcare GmbH

Jülicher Straße 306

52070 Aachen

Alemania



Primera instalación e instrucciones de uso

www.voss-healthcare.net

info@voss-healthcare.net

+49 241 510 056 22

Número de pieza: 7013348400

Versión: v01.0EN

Visítenos en Internet en:
voss-healthcare.net

