



Förstagångsinstallation och användarinstruktion

För följande modeller:

ello_v02_55G, ello_v02_55R, ello_v02_55B,
ello_v02_62G, ello_v02_62R, ello_v02_62B

1. Översikt

1.1 Förstagångsinstallation – steg för steg

1. Montera framhjulen.
Detaljer i kapitel 2
2. Justera handtagens höjd.
Detaljer i bruksanvisningen
3. Kontrollera bromsens inställning.
Metod för inställning i bruksanvisningen
4. Montera ryggbältet.
5. Montera väskan.

1.2 Checklista för första installationen

- | | |
|---|--|
| ☐ Framhjul och designlister monterade | ☐ Bromsjustering kontrollerad |
| ☐ Handtagen är inställda på samma och korrekt höjd | ☐ Ryggbälte monterat |
| ☐ Fast höjdjustering | ☐ Väska monterad |

1.3 Checklista för funktioner

- ☐ Enheten kan slås på och av.
- ☐ Alla lampor fungerar,
men täck över ljussensorn (på undersidan av höger säte, se bild). ello har 5 lampor (2x fram, 2x bak, 1x under sätet).
- ☐ Signalhorn fungerar.
- ☐ Hinderknappen fungerar,
om inte, kontrollera bromsinställningen.
- ☐ Enheten ger ett märkbart stöd när man går i uppförsbacke.
- ☐ Enheten bromsar märkbart när man går i nedförsbacke.
För att göra detta ställer du in konditionsnivån på en låg nivå.



2. Montera framhjulen

1. Ta bort säkerhetssprinten från ramen.

Det är bäst att trycka ut med hjälp av ett tunt verktyg (insexnyckel, skruvmejsel).



2. Sätt i framhjulsenheten.

Höger/vänster är identiska. Se till att urtaget (A) är vänt nedåt.



3. Sätt tillbaka säkerhetssprinten.



4. Kontrollera att hjulet sitter fast ordentligt genom att dra i hjulet.



5. Montera och kläm fast designpanelerna.

Observera: Designpanelerna höger/vänster är olika.



3. Användarinstruktioner

ello är utformad för att kunna styras så enkelt och intuitivt som möjligt. Det krävs dock en noggrann instruktion eftersom ello skiljer sig från en vanlig rollator.

3.1 Grundläggande princip

slå på ello och börja köra – sensorsystemet tar över justeringen av stödet och för att detta ska fungera optimalt måste lämplig konditionsnivå ställas in för användaren. Detta påverkar främst bromsbeeendet i nedförsbackar och beteendet vid användning av hinderknappen.

Obs! Använd alltid termen *konditionsnivå* – inga alternativ som ”stödnivå” eller ”fartnivå”. Det leder till förvirring bland användarna.

Följande funktioner och manövrer måste övas med användaren minst en gång (enligt beskrivningen i bruksanvisningen):

- Gå i uppförsbacke och nedförsbacke.
- Steg uppåt och neråt.
- Fäll ihop eller fäll ut rollatorn.
- Ladda batteriet.

3.2 Särskilt viktiga säkerhetsanvisningar

- Dra alltid åt parkeringsbromsen innan du sätter dig ner!
- Om bromsarna är för hårt eller för löst inställda måste de justeras på nytt!
- Ingen persontransport med rollatorn!

3.3 Anmärkningar om användningen

- Hinderknappen används endast för att övervinna hinder och ojämn terräng – **inte för kontinuerlig drift.**
- Initiala svårigheter när hinder passeras är normala. Korrekt teknik måste läras ut (se bruksanvisningen).
- Om enheten inte bromsar tillräckligt i nedförsbackar kan konditionsnivån justeras. Om detta inte är tillräckligt ska den manuella bromsen användas.
- När rollatorn är avstängd kan den användas som en vanlig rollator.

Förstagångsinstallation och användarinstruktion

Tillverkare

VOSS sjukvård GmbH

Jülicher Straße 306

52070 Aachen

Tyskland

info@voss-healthcare.net

+49 241 510 056 22

Artikelnummer: 7013348400

Version: v01.0EN

Besök oss på webben på adressen:
voss-healthcare.net

